

INFORMACIÓN MASCARILLA QUIRÚRGICA BYD

PRODUCTO SANITARIO

Fabricante: BYD Precision Manufacture Co., Ltd. NO.3001 Baohe Road, Baolong Industrial City, Longgang, Shenzhen, China

Representante autorizado en la Comunidad Europea: Wellkang Ltd, 16 Castle St, Dover, Kent, CT16 1PW, England, UK. Tel: +86 755-89888888

Importador: ACOFARMA DISTRIBUCION, S.A., C/Llobregat 20, P.I. Sta. Margarita, Terrasa (Barcelona 08223), España

Lugar de procedencia: China

Denominación: Mascarilla de un solo uso BYD.

Descripción: Producto no estéril, un solo uso. Para cubrir la boca, la nariz y la barbilla, la máscara proporciona una barrera física para reducir el riesgo de propagación de infecciones, especialmente en situaciones epidémicas o pandémicas.

Composición: Consiste en tres capas de material no tejido: las capas externa e interna están hechas de polipropileno hilado no tejido y la capa intermedia de polipropileno fundido no tejido con filtro de patógenos. La pinza nasal usa plástico con núcleo de metal, y el arnés de cabeza usa spandex de poliéster elástico

Periodo recomendado de uso continuado: No se recomienda utilizar esta mascarilla por un periodo superior a 4 horas

Lote: Ver envase

Fecha fabricación y caducidad: Ver envase

Normativa: cumplimiento UNE-EN 14683:2019+AC Tipo I

Instrucciones y Advertencias: Para evitar la pérdida de eficacia de la mascarilla y el posible aumento del riesgo de transmisión, es fundamental ponérsela, quitársela y eliminarla correctamente. La utilización de la mascarilla solo es efectiva en combinación con las medidas de higiene y distanciamiento social. Esta mascarilla no es reutilizable y se debe desechar tras su uso.

Colocación de la mascarilla:

- 1) Lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica
- 2) Colocar en la cara y sostener desde el exterior, pasar el arnés de cabeza a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos
- 3) Bajar la parte inferior a la barbilla y verificar que la cubra. Ajustar la pinza nasal a la nariz
- 4) Verificar que está correctamente ajustada y una vez ajustada intentar no tocar con las manos de nuevo, sin previamente realizar una correcta higiene de manos

Para retirar la mascarilla:

- 1) Lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica
- 2) Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla
- 3) Desechar la mascarilla en un contenedor provisto de una bolsa de plástico
- 4) Lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica

Aquellos que son alérgicos a los no tejidos deben usarlo con precaución. Por favor, consulte con un médico si es necesario. Diseñado para su uso en entornos con exposición moderada a fluidos. Almacenar en una habitación con un nivel de humedad relativa de no más del 80%, sin gases corrosivos y buena ventilación para evitar altas temperaturas.

Contraindicación: Este dispositivo no está diseñado, vendido o destinado para su uso, excepto como se indica. Esta máscara no es un respirador.

Advertencia: Esta máscara no elimina el riesgo de contraer ninguna enfermedad o infección. Cambie inmediatamente si está contaminado con sangre o líquido corporal.